


N95

DESECHABLE
UNITALLA



14427
MAS-PLE

Instrucciones de colocación:

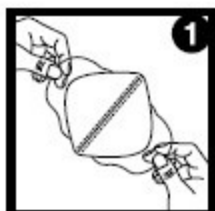

1 Abra la mascarilla plegable y sujétela de los elásticos laterales. Revise que no presente daños.



3 Jale la cinta izquierda y colóquela sobre su oreja izquierda, de la misma manera jale la cinta derecha y colóquela sobre su oreja derecha.



Prueba de ajuste

Coloque ambas manos sobre el respirador. Inhale rápidamente y tenga cuidado de no distorsionar la posición de la misma. Se debe sentir una presión negativa (el respirador se deprime hacia la cara), si no sucede esto, o si hay fuga alrededor de las orillas de la misma reposicione el respirador y la cinta elástica para un ajuste correcto.



2 Coloque el respirador cómodamente contra el puente de la nariz y ajuste la mascarilla hacia la barbilla.



4 Usando ambas manos moldee la pieza plástica nasal a la forma de su nariz y área de las mejillas. Si se usa una sola mano se puede causar un mal sello, resultando en un funcionamiento deficiente del respirador.