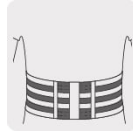


TRUPER

CÓDIGO: 11961 CLAVE: FAJA-MC

**Faja lumbar tipo cinturón de malla transpirable, M, TRUPER**


- Fabricada de poliéster y elastano
- Cinturón de soporte abdominal con fijación hook and loop
- Flexible para mayor comodidad
- 3 Varillas para soporte lumbar
- Ideal para mover o cargar objetos pesados
- Previene ciertas deformidades corporales

**Certificaciones y garantías****Especificaciones**

Talla	Mediana (M)
Empaque individual	Blíster
Inner	2
Master	16
Pallet	288

**País de origen****Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER**



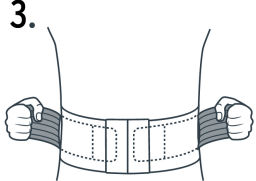
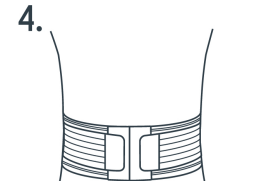
Imágenes complementarias

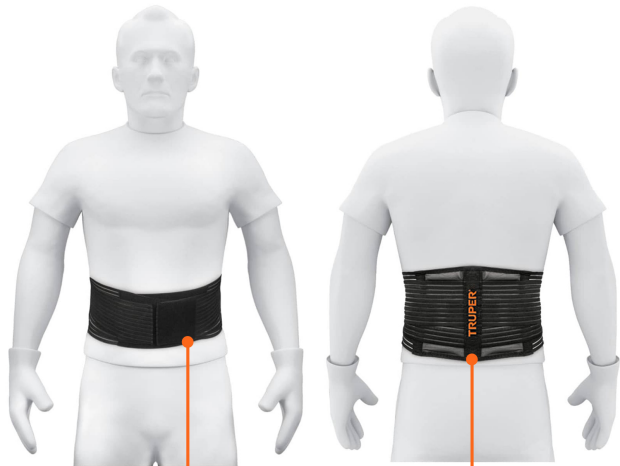

Cierre con fijación hook and loop

3 Varillas para soporte lumbar

Instrucciones

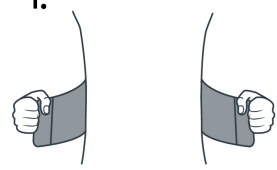1.  Tome ambos extremos de la base de la faja y tensiónelos.
2.  Cierre ajustando firmemente la base a su cintura con las puntas de fijación hook and loop.
3.  Estire los laterales elásticos exteriores y colóquelos en la base de la faja hasta que quede firmemente ajustada.
4.  La faja está colocada correctamente, ahora está listo para comenzar a trabajar.

